

FAST Junior XENNA®

MIKROWLEWKI Z PROPOLAXEM®
6 mikrowlewek po 5 g
Wyrób medyczny

DZIECI

Wskazania: XENNA FAST JUNIOR mikrowlewka z Propolaxem® to środek przeczyszczający na bazie naturalnych ekstraktów i składników cukrowych o działaniu ochronnym, oraz łagodzącym błonę śluzową odbytnicy. Produkt zmniejsza dyskomfort i przeciwdziała podrażnieniom spowodowanym zaparciem. XENNA FAST JUNIOR przyciąga wodę do stolca, przez co zmiękcza masy kałowe, ułatwiając wypróżnienie.

XENNA FAST JUNIOR zawiera Propolax® - kompleks bogaty w monosacharydy, polisacharydy i melanoidyny z wyselekcjonowanych, specjalnie przetworzonych białych winogron, dodatkowo wzbogacony frakcjami polisacharydowymi z aloesu, malwy i prawoślazu. Kompleks Propolax® zawiera węglowodany i alkohole wielowodorotlenowe, które poprzez właściwości osmotyczne ułatwiają wypróżnianie u osób z zaparciami. Aloes, malwa i prawoślaz wykazują działanie nawilżające, zmiękczające i śluzopodobne, ułatwiając przechodzenie mas kałowych. Ponadto propolis hydroglicerynowy działa ochronnie na błonę śluzową odbytnicy.

Składniki: dejonizowany koncentrat moszczu winogronowego, sorbitol, woda, wyciąg z malwy, żel aloesowy, płynny wyciąg z prawoślazu, hydroglicerynowy wyciąg z propolisu.
Substancje konserwujące: benzoesan sodu, sorbinian potasu

Dawkowanie: *Dzieci w wieku 1-12 lat:* jedna mikrowlewka 5 g w razie potrzeby.
Dzieci w wieku 3-12 lat: w przypadku uporczywych zaparć stosować podwójną dawkę.

Sposób stosowania: DOODBYTNICZO. Każda mikrowlewka jest zamknięta w szczelnym, gotowym do użycia opakowaniu w celu zapewnienia higieny i ułatwienia stosowania. Zdjąć osłonę kaniuli z pojemnika jednodawkowego. Przed wprowadzeniem do odbytu można posmarować końcówkę aplikatora kroplą roztworu. Wprowadzić końcówkę aplikatora do odbytu i wycisnąć roztwór z pojemnika. Wyjąć aplikator, trzymając mikrowlewkę przez cały czas ściśniętą.

Ostrzeżenia: nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jeden lub więcej składników. W przypadku uporczywych zaparć zasięgnąć porady lekarza, aby wykluczyć inne schorzenia. Mikrowlewek nie należy stosować w przypadku ostrych bólów brzucha lub bólów niewiadomego pochodzenia. Mikrowlewki są przeznaczone do jednorazowego użytku, dlatego też nie należy ich stosować ponownie. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania lub po terminie ważności.

Przechowywanie: przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła światła i ciepła, unikając niskich i wysokich temperatur.

6 jednodawkowych mikrowlewek po 5 g (całkowita masa netto 30 g e)

CE 0546

Objaśnienie symboli

 Wytwórca
  Użyć przed
  Kod partii
  Kod produktu
  Zapoznaj się z ulotką
  Nie używać ponownie
  Po zużyciu, opakowanie wrzuć do kosza
  Maksymalna temperatura przechowywania


 INDUSTRIA FARMACEUTICA
NOVA ARGENTIA S.r.l.
Via Carlo Porta, 49
Gorgonzola - Milano, Włochy
www.novaargentia.it
contact@novaargentia.it



Rev. 02 del 01/2019


 USP Zdrowie
Dystrybutor:
USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35,
02 - 822 Warszawa
☎ 22 543 60 00